

**BARELLA-SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE
WHEELCHAIR FOLDING STRETCHER
CHARIOT-BRANCARD PLIABLE
ROLLSTUHL UND KLAPPBARE TRAGE
CAMILLA PLEGABLE PARA SILLAS DE RUEDAS
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ
НОСИЛКА-ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА С КОЛЕЛА, СГЪВАЩА СЕ
SKŁÁDACÍ NOSÍTKA PRO INVALIDNÍ VOZÍK
SAMMENKLAPPELIG KØRESTOLSBÅRE
KOKKUPANDAV RATASTEGA KANDERAAM-TOOL
TAITETTAVA PAARI-PYÖRÄTUOLI
SKLOPIVA INVALIDSKA KOLICA NOSILA
ÖSSZECSUKHATÓ KEREKESSZÉK-ÖSSZECSUKHATÓ
SULANKSTOMAS NEJGALIOJO VEŽIMĖLIS – NEŠTUVAI
RATINĖKRĖSLA SALIEKAMĀS NESTUVES
INKLAPBARE ROLSTOELBRANCARD
NOSZE SKŁADANE W WÓZEK INWALIDZKI
TARGĀ PLIABILĀ TIP SCAUN CU ROTILE
ZLOŽLJIVA NOSILA ZA INVALIDSKI VOZIČEK
HOPFÄLLBAR SJUKBÅR FÖR RULLSTOL**

REF TD010113A (GIMA 56020)



Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made in China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Par nopietnu negadījumu, kas notiek saistībā ar mūsu piegādāto medicīnisko ierīci, jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentā iestādei, kurā negadījums ir radies.

Tehniskais parametrs:

1. izmērs (L*P*A): Izmērs nesaliktā veidā: 196*50*18 (cm) Izmērs saliktā veidā: 106*50*15 (cm)
2. Saliktas ratiņkrēsla formā: Muguras augstums: 136cm Sēdekļa augstums: 52cm
3. Neto svars:9kg Bruto svars:11kg
4. Kravnesība: 159 kg



Figure 1:
stretcher position



Figure 2:
Insurence buckle 2
buckle on the pipe 1



Figure 3:
wheelchair position



Figure 4:
foldable position

Piemērojamā darbības joma:

1. Kā parādīts pirmajā attēlā: alumīnija sakausējuma ratiņkrēslu nestuvju izplešanās rezultātā ir lietderīgi izmantot drošības siksnu pēc tam, kad pacients atrodas uz nestuvēm.
2. Nestuvju salikšana ratiņkrēsla veidā. Kā parādīts otrajā attēlā, salieciet nestuves, paceliet uz augšu, lai tās virzītu bultiņas norādītajā virzienā, nonākot pozīcijā, kas parādīta trešajā attēlā. Piestipriniet drošības sprādzi (nodrošināt, lai sprādze 2 piesprādzētos uz bides skrūves 1).
3. Rāda diagrammu 3 atbalsta kājām, ir arī otra veida riteņu tipa kājas. Produkta veiktspēja, lietojums, piemērojamā darbības joma, utt. ir vienādi.
4. Kā parādīts ceturtajā attēlā, pēc nestuvju salocīšanas tās ir piemērotas pārnēsāšanai mājās (kad nestuves atrodas pozīcijā kā trešajā attēlā, atbrivojas drošības sprādze, pārvietojas uz šķērsstieņa blakus kāju ritenim, sēdekļa atzveltnes spilvena stienis paceļas, izraisot nestuvju atgriešanos pozīcijā kā pirmajā attēlā, un tās var salocīt).

Piemērojamā darbības joma:

Šo produktu var izmantot šauras ieejas gaitenēs, likumotos gaitenēs vai daudzplatformu kāpņu gaitenēs utt., kur ar grūtībām var iekļūt slēgtās zonās.

Apkope:

1. Bieža rūpīga apkope (ieskaitot dezinfekciju).
2. Biežas pārbaudes, vai daļas nav pārāk pieblīvētas.

Īpašs atgādinājums

Jāgarantē, ka drošības siksnas ir labā stāvoklī, ja tā tiek izmantota, un noteikti jānodrošina sprādze un bides skrūve, ja tiek izmantotas ratiņkrēsla nestuves

Uzglabāšana un transportēšana:

1. Šis produkts jāuzglabā no mitruma aizsargātā un korozijas izturīgā vietā.
2. Šis produkts ir pieejams kā vispārīgs transportēšanas līdzeklis.
3. Atbilstoši grafiskajam attēlam uzglabāšana un transportēšana jāveic iepakojuma kastē.

Iepakojums un piederumi:

1. Šis produkts ir iepakots kartona kastē.
2. Komplektācijā iekļauti: kvalifikācijas sertifikāts, lietotāja rokasgrāmata.

	Ražotājs		Uzglabāt vēsā, sausā vietā		Importēja
	Produkta kods		Nav sterils		Uzmanību: Izlasiet un uzmanīgi ievērojiet lietošanas instrukcijas (brīdinājumus)
	Partijas numurs		Medicīniskā ierīce		Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā
	Izlasiet lietošanas instrukcijas		Izgatavošanas datums		
	Medicīniska ierīce, kas atbilst Regulai (ES) 2017/745				

GIMA GARANTIJAS NOTEIKUMI

Gima tiek piemērota 12 mēnešu standarta B2B garantija.