



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

## BARELLA TRENDELENBURG TRENDELENBURGA PACIENTU RATIŅI


- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- Par visiem nopietniem negadījumiem, kas saistīti ar mūsu piegādāto medicīnisko ierīci, ir jāziņo ražotājam un kompetentajai iestādei tajā dalībvalstī, kurā atrodas jūsu juridiskā adrese.

**REF**

27850

Gima SpA  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Itālija  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com  
Ražots Itālijā



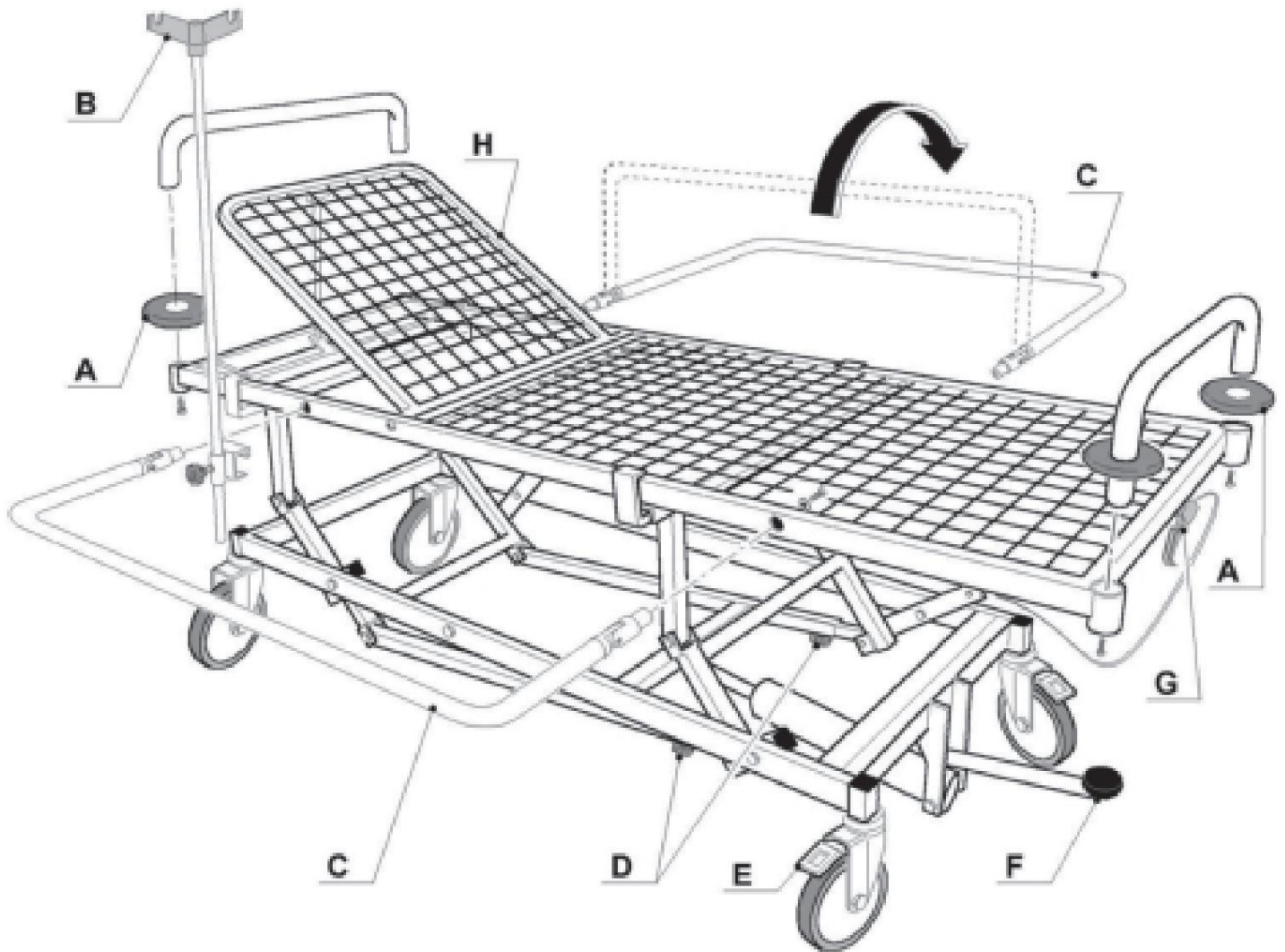

## IEVADS

Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/745 šis produkts ir daļa no I KLASES MEDICĪNAS IERĪCĒM. Pirms šīs medicīniskās ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

## APRAKSTS:

Ratiņi paredzēti transportēšanai, pielāgojot pacienta pozu (Trendelenburga leņķis līdz 5° - anti-Trendelenburga leņķis līdz 12°). Pacienta drošību garantē arī buferi un noliecami sānu borti. Ratiņi ir paredzēti lietošanai telpās kā palīg līdzeklis pacientiem pansionātos.

Produktu vai tā daļas nedrīkst izmantot citiem mērķiem, izņemot tos, kas norādīti šajā rokasgrāmatā.

## SASTĀVDAĻAS:

- Ortopēdiska matrača platforma ar Trendelburga spilventiņu • Galvgaļa un kājgaļa rokturi ar attiecīgiem buferiem • Četri riteņi Ø 200 mm, divi no tiem ar bremsēm • Salokāmas malas pēc pieprasījuma

## Montāžas materiāls

- N.4 pelēki gumijas pumpji • N.4 TBE 8x25 SKRŪVES + M8 paplāksnes

## MONTĀŽAS INSTRUKCIJA Pēc iepakojuma

atvēršanas vispirms ir jāpārbauda visas izstrādājuma sastāvdaļas un detaļas. Pārliedziniet, vai tās visas ir savās vietās un ir nevainojamā stāvoklī.

Divi riteņi bez bremsēm ir uzstādīti uz galvgaļa, bet bremsējošie riteņi E ir uzstādīti uz kājgaļa. Montāžas laikā riteņu bremses E ir jānoblēķē. Kad uzstādīšana ir pabeigta, pārbaudiet, vai kājas fiksējošie uzgriežņi ir pareizi pievilkti, un vai galvgalis un kājgalis ir pareizi ievietoti.

Montāža sastāv no vienkāršas galvgaļa un kājgaļa uzstādīšanas ar attiecīgiem buferiem A, kā parādīts attēlos. IV statīvs B un noliecami sānu dēļi C tiek piegādāti pēc pieprasījuma.

## DARBĪBA

Lai paceltu ratiņus, nospiediet pedāli F, nespējot to līdz galam. Lai nolaistu ratiņus, nospiediet pedāli F, līdz sasniedzat gala pozīciju. Kad ratiņi ir pacelti, galvgali H var pacelt, izmantojot blakus esošās sviras. Ratiņi ir aprīkoti ar Trendelenburga funkciju līdz 9° un anti-Trendelenburga funkciju līdz 14°. Lai sasniegtu šādu slīpumu, izmantojiet sviru G un nospiediet vai paceliet plauktu, līdz tiek sasniegta vēlamā pozīcija, pēc tam atlaidiet sviru G. Noliecamās sānu malas C ir novietotas uz enģēm. Šī iemesla dēļ pēc pacelšanas tās paliek bloķētas šajā pozīcijā gravitācijas ietekmē; lai tās nolaistu, tās ir jāpavelk uz augšu un jānoliec, uzmanīgi, lai tās nenokristu. Parasti rokrati D jāatstāj neatkrūvēti vai atvērtā stāvoklī; tos var izmantot, lai ārkārtas gadījumā, ja slīpuma sistēma ar sviru G nedarbojas, pastāvīgi bloķētu Trendelenburga ierīces pozīciju.

## TEHNISKIE DATI


Mērišana	185x65 cm (iekšējie izmēri) 197x71 cm (kopējie izmēri) Regulējams augstums, no 51 līdz 71 cm Trendelenburga līdz 5° antitrendelenburga līdz 12°
Svars	64 kg – 72 kg ar kasti
Maksimālā ietilpība	120 kg

## BRĪDINĀJUMI!

- Ievērojiet dotos norādītos maksimālos plūsmas ātrumus loksnes.
- Pārbaudiet, vai fiksācijas uzgriežņi ir pievilkti.
- Izvairieties no tiešas saskares ar atvērtām brūcēm.
- Nelietot ārpus telpām.
- Regulējot divāna un atzveltnes augstumu, pārliedziniet, ka neviens neievieto rokas, kājas vai citus priekšmetus kustības zonā: SASPIEDŠANAS RISKS!
- Pārvietojiet gultu, nepaceļot to no grīdas.
- Pirms gultas pārvietošanas atbloķējiet riteņus.

## APKOPE UN TĪRĪŠANA

- Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Regulāri pārbaudiet visus stiprinājuma punktus.
- Lai vislabāk saglabātu, ieteicams izvairīties no ilgstošas saules gaismas iedarbības, saskares un nogulsnešanās salsūdenī un ļoti mitrā vidē.
- Nomazgājiet nerūsējošā tērauda virsmas ar ziepjūdeni un izmantojiet atbilstošus dezinfekcijas līdzekļus.
- Noskalojiet ar mitru drānu un rūpīgi nosusiniet.
- Neizliet uz virsmas tīrīšanas līdzekļus, kas satur hloru vai amonjaku, taukainas un eļļainas vielas.
- Nelietojiet tīrīšanas piederumus, kas satur dzelzi. Ja nepieciešams, dezinfekcijai izmantojiet tikai piemērotus, nekorodējošus līdzekļus.

	Sargāt no saules gaismas		Medicīnas ierīce, kas atbilst prasībām Regula (ES) 2017/745
	Produkta kods		Skatiet norādījumus lietošanai
	Uzmanību: izlasiet instrukcijas (brīdinājumi) uzmanīgi		Partijas numurs
	Uzglabāt vēsā, sausā vietā		Ražotājs
	Medicīnas ierīce		Ražošanas datums
	Unikāls ierīces identifikators		

## GIMA GARANTĪJAS NOTEIKUMI

Ir spēkā Gima 12 mēnešu standarta B2B garantija.